


Vision-X[®] Lagerungshilfen

Für den Einsatz in der Radiologie

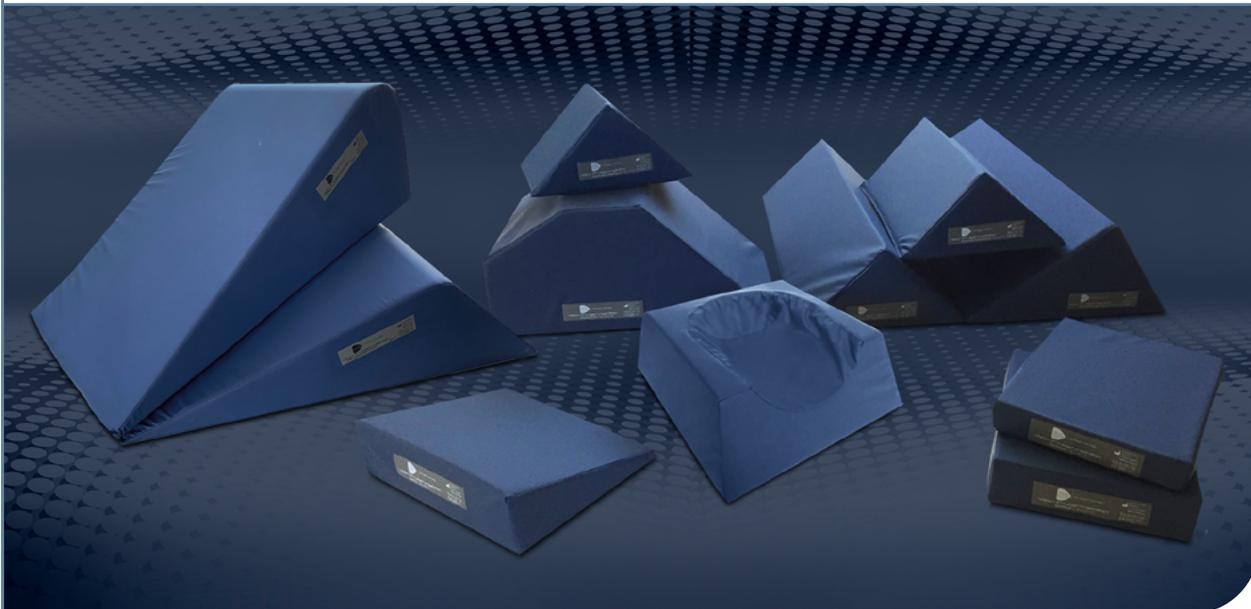

Empfehlung:

Vor dem Einsatz unserer Vision-X[®] Lagerungshilfen lesen Sie bitte die Hinweise in der Gebrauchsanleitung. Wenn Sie Informationen darüber hinaus benötigen oder Fragen zu den Hinweisen haben, kontaktieren Sie uns einfach unter der E-Mail:

roentgen-bender@bendergruppe.com

Produktkennzeichnung und CE:

Die Vision-X[®] Lagerungshilfen sind Medizinprodukte der Klasse I und entsprechen der EU Regulation 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 05. April 2017 für Medizinprodukte. **Der Hersteller ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 vom TÜV Süd.**

Indikationen und Wiedereinsatz:

Die Indikationen können aufgrund der großen Einsatzmöglichkeiten an keinem bestimmten Krankheitsbild festgemacht werden, da Positionierungshilfen für alle Anwendungen an Menschen mit Unterstützungsbedarf bei Positionierungen geeignet sind.

- Unterstützung bei Positionierungen
- Stabilisierung bei Positionierungen
- Druckentlastung bei Positionierungen

Unsere Lagerungshilfen sind für den Wiedereinsatz entwickelt. Vor dem Wiedereinsatz muss die Lagerungshilfe feucht gereinigt und desinfiziert werden.

Produktübersicht:

Vision-X® Lagerungshilfen

Beschreibung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Form	Artikel- EAN-Nr.
Vision-X® Dreieck 45°	18 x 24 x 12 cm	0,10 kg	gleichschenkelig	42682 4250355380142
Vision-X® Dreieck 45°	36 x 24 x 12 cm	0,18 kg	gleichschenkelig	42681 4250355380135
Vision-X® Dreieck 45° ESH*	36 x 24 x 12 cm	0,50 kg	gleichschenkelig	43940 4250355381132
Vision-X® Dreieck 45°	60 x 25 x 12,5 cm	0,30 kg	gleichschenkelig	42684 4250355380111
Vision-X® Dreieck 45° ESH*	60 x 25 x 12,5 cm	0,97 kg	gleichschenkelig	43939 4250355381118
Vision-X® Rechteck	18 x 24 x 5 cm	0,08 kg		47157 4250355380319
Vision-X® Keil 15°	18 x 24 x 7 cm	0,08 kg		42679 4250355380173
Vision-X® Keil 15° ESH*	18 x 24 x 7 cm	0,15 kg		43941 4250355381170
Vision-X® Keil 15°	25 x 18 x 7 cm	0,70 kg		47164 4250355380395
Vision-X® Kopfunterlage Hinterkopf	25 x 27 x 9 cm	0,14 kg		47156 4250355380326
Vision-X® Körperstütze	40 x 30 x 18 cm	0,46 kg		42680 4250355380197
Vision-X® Knielagerungskissen 120°	60 x 40 x 16 cm	0,70 kg		43938 4250355380364

* **ESH = erhöhte Stauchhärte**

Produktmaterial und Produktbezug:

Das Produktmaterial besteht aus Schaumstoff und die Bezüge erfüllen die von Hygieneexperten geforderten Qualitätskriterien in hohem Maße durch das besondere Beschichtungsmaterial Polyurethan. Darüber hinaus sind die Bezüge rutschhemmend.

Produktlagerung:

-5°C bis 40°C und vor Sonneneinstrahlung schützen

Nutzungsdauer und Lebenszyklus:

Wird das Produkt gemäß den Sicherheitsvorschriften verwendet, beträgt die zu erwartende Produktlebensdauer drei Jahre. Die effektive Lebensdauer kann jedoch, abhängig von der Häufigkeit und Intensität des Gebrauchs, der Anzahl der Reinigungs- und Desinfektionsvorgänge, variieren.

Führen Sie regelmäßig eine Funktionskontrolle mit dem Produkt durch und beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.

Produktpflege:

Die Vision-X® Lagerungshilfen können feucht gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gut trocknen. Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, chlorhaltigen oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Wenn erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion z.B. mit dem Produkt Trionic® (DGHM/VAH Zulassung, weitere Informationen auf Anfrage).

Beachten Sie bitte unbedingt den Pflegehinweis am Etikett jeder Vision-X® Lagerungshilfe sowie die Angaben auf der jeweiligen Gebrauchsanleitung.



Nicht waschen



Nicht bleichen




Nicht chemisch reinigen

Produktanwendungs- und Einsatzgebiete:

Die Anwendungsgebiete der Vision-X® Lagerungshilfen beziehen sich in erster Linie auf Patienten, die Unterstützungsbedarf bei Positionierungen, z.B. radiologische Untersuchungen (Röntgen, CT, MRT) haben. Sie finden ihren Einsatz sowohl in der Klinik als auch im Praxisbereich.

Bebilderte Produktanwendungsbeispiele:

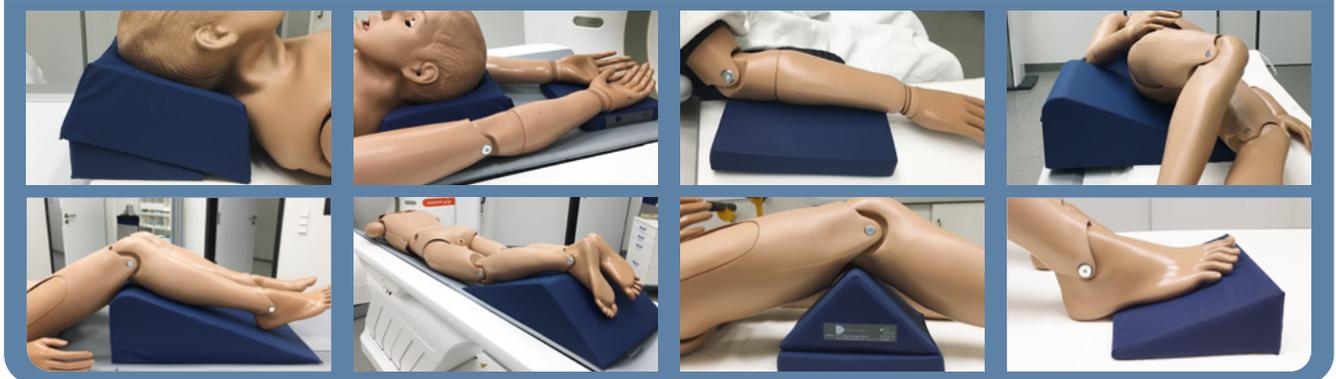

Sicht- und Funktionskontrolle:

Die Vision-X® Lagerungshilfen unterliegen auch einem natürlichen Alterungsprozess. Überprüfen Sie unser Produkt regelmäßig und sorgfältig und unbedingt vor jedem Wiedereinsatz. Stellen Sie sicher, dass die Lagerungshilfen in einem einwandfreien Zustand und das Material und die Nähte nicht beschädigt sind. Überprüfen Sie diese Eigenschaften – am besten im Vergleich mit einem neuen Produkt.

Kontraindikation und Anwendungsrisiken:

Kontraindikationen können an keinem bestimmten Krankheitsbild festgemacht werden. Unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise, darf bei folgenden Patientenbeschwerden das Produkt nicht angewandt werden: Individuell empfundene Schmerzen; Erhöhung des Auflagedruckes an Wunden oder Dekubitusgeschwüren

Garantie:

Wir garantieren, dass die Vision-X® Lagerungshilfen frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Die Garantieleistung bezieht sich auf einen Zeitraum von einem Jahr. Diese erstreckt sich nicht auf Mängel, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Wir übernehmen keine Haftung für zufällige oder mittelbare Verletzung bzw. Sachschäden.

Sicherheitshinweise:

! WARNUNG kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnte!

An dieser Stelle möchten wir Sie auf folgende Sicherheitskriterien hinweisen, um mögliche Risiken für Patienten und Sachgegenstände zu vermeiden!

- Defekte Produkte dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Ein anderweitiger Einsatz der Lagerungshilfen ist nicht zulässig.
- Bei eingeschränkter Mobilität sichern Sie unbedingt den Lagerungsablauf.
- Lagerung nur durch Fachpersonal oder mit entsprechender Einweisung vornehmen.
- Die Anwendung von hochalkoholischen Desinfektionsmitteln sollte vermieden werden. Farbige Desinfektionsmittel (jodhaltige) können leichte Verfärbungen verursachen.
- Bei der Reinigung unbedingt auf scharfe Reinigungsmittel verzichten! Sie verursachen ein Verhärten des Polyurethans, welches dadurch brüchig wird und Undichtheiten die Folge sind.

Symbolerklärung:

									
Nicht waschen	Nicht bleichen	Nicht chemisch reinigen	Firmensignet	Kennzeichnung Medical Device	Gebrauchsanleitung beachten	Hersteller	Chargen-Nr./ Lot-Nr.	Code zur Identifikation	Konformitätszeichen

Entsorgungshinweis:

Für die Vision-X® Lagerungshilfen bestehen keine besonderen Entsorgungsvorschriften; sie können ggf. gemäß nationaler und örtlicher Vorschriften entsorgt werden.

Hersteller:

Petermann GmbH

Waldweg 3 | D-91601 Dombühl | Telefon: +49 (0)9868-9339-0 | E-Mail: petermann@pm-med.de

Kontaktmöglichkeiten:

Falls Sie Fragen rund um unsere Vision-X® Lagerungshilfen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren betreuenden Medizinprodukteberater oder an unser Team im Innendienst. Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter:

röntgen bender GmbH & Co. KG

Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 8-10 | D-76534 Baden-Baden

T: +49 7223.9669.0

E: roentgen-bender@bendergruppe.com

Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen an den Vision-X® Lagerungshilfen sowie Farbabweichungen oder Druckfehler

